



Misuratore della distanza tra le pupille

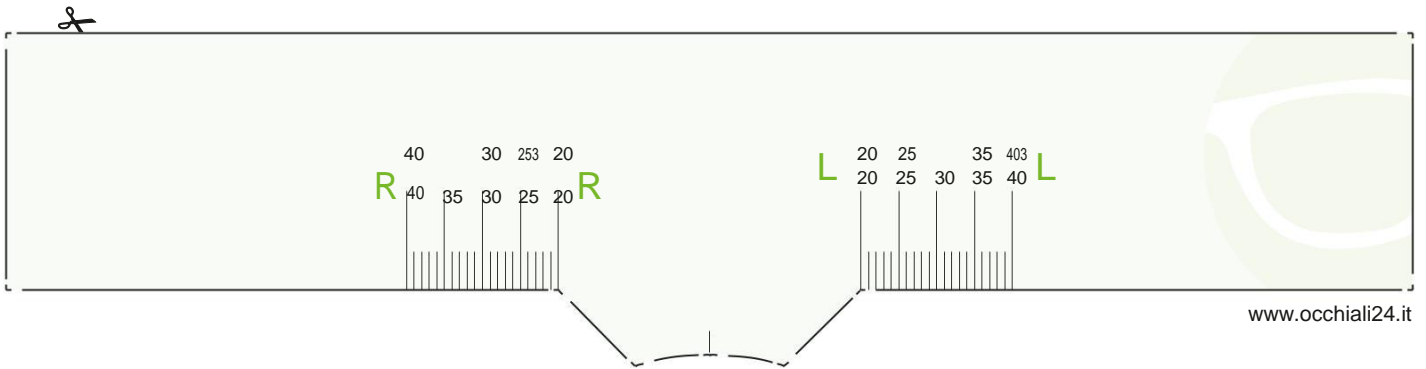

Istruzioni per l'uso

- ❶ Stampa il misuratore possibilmente su una carta leggermente spessa.
- ❷ Controlla con un righello, che la dimensione della stampa, che hai appena effettuato, sia in scala. La distanza tra le linee lunghe deve essere sempre di 5mm.
- ❸ Ritaglia il misuratore di occhiali24.it lungo il contorno.
- ❹ Mettiti di fronte allo specchio o ad un'altra persona che possa leggerti le misure.
- ❺ Posiziona il misuratore in modo che la prominente al centro della barra si posizioni sul dorso del naso. Per lato R si intende l'occhio destro mentre per lato L l'occhio sinistro.
- ❻ Chiudi l'occhio sinistro e guarda con quello destro o verso lo specchio o verso il tuo assistente. Adesso leggi il valore sul misuratore dell'occhio destro al centro della pupilla destra. Ripeti la procedura inversa con l'occhio sinistro.

Dato che un volto è raramente perfettamente simmetrico, è assolutamente normale che il valore dei due occhi sia leggermente diverso. La distanza pupillare è in genere tra 25 mm e 40 mm.

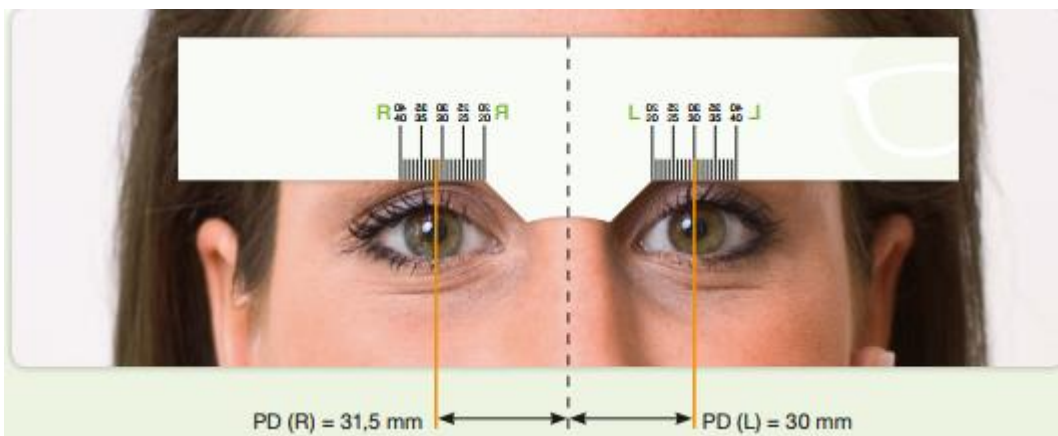

Anfahrt:

occhiali24.it SRL
 39031 Brunico
 PARTITA IVA 02934890217
 Via dei Campi della Rienza 30

Kontakt:

Telefono 0471-1660200
 Email: info@occhiali24.it
 Tutti i giorni dalle 8 alle 22
 Web www.occhiali24.it